




外観

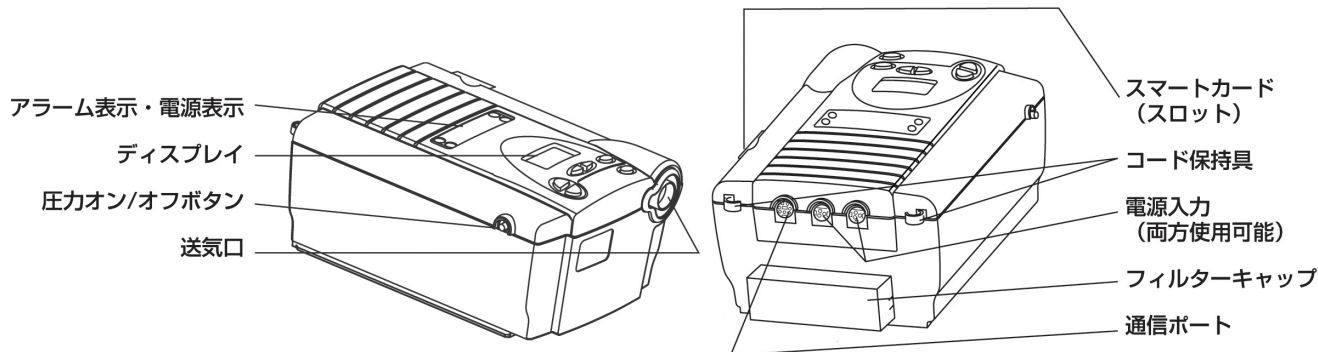

※フィルターの交換について
 フィルターは使用前に点検してください。
 2週間を目安に花粉フィルターは清掃し、
 極微細フィルターは交換してください。
 フィルターキャップは左右のノッチを押して取り外します。

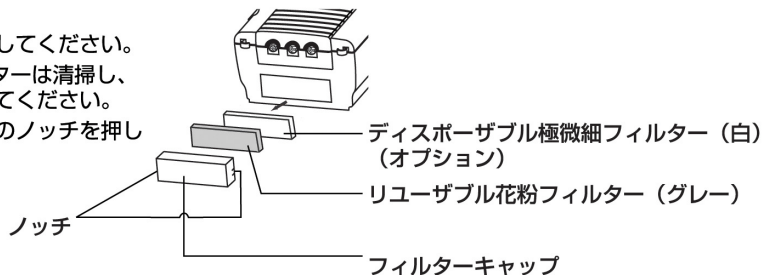

表示部・操作部

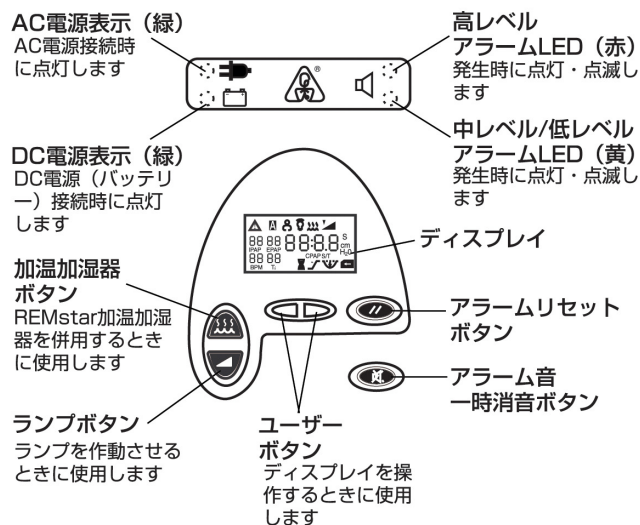

ディスプレイに表示されるアイコンの説明

	使用者に対して注意を喚起しているときに点滅します		ランプ開始圧設定時に点滅します
	無呼吸アラーム有効時に表示、同設定時とアラーム発生時に点滅します		アクセスレベルが医療従事者モードのときに表示、アクセスレベル設定時に点滅します
	患者回路外れアラーム有効時に表示、同設定時とアラーム発生時に点滅します		治療時間メーターリセット時に点滅します
	加温加湿器・ランプ・アラームリセット・アラーム音一時消音ボタンのバックライトがオンになっているときに表示、同設定時に点滅します		治療時間メーター表示中に表示、同リセット時に点滅します
	REMstar加温加湿器がオンのときに表示、同温度設定時に点滅します		ライスタイム設定中に点滅します
	ランプ進行時に表示、同設定時に点滅します		Bi-Flex有効時に表示、同設定時に点滅します
			スマートカードが挿入されているときに表示します