


ii. 小児用呼吸回路の接続

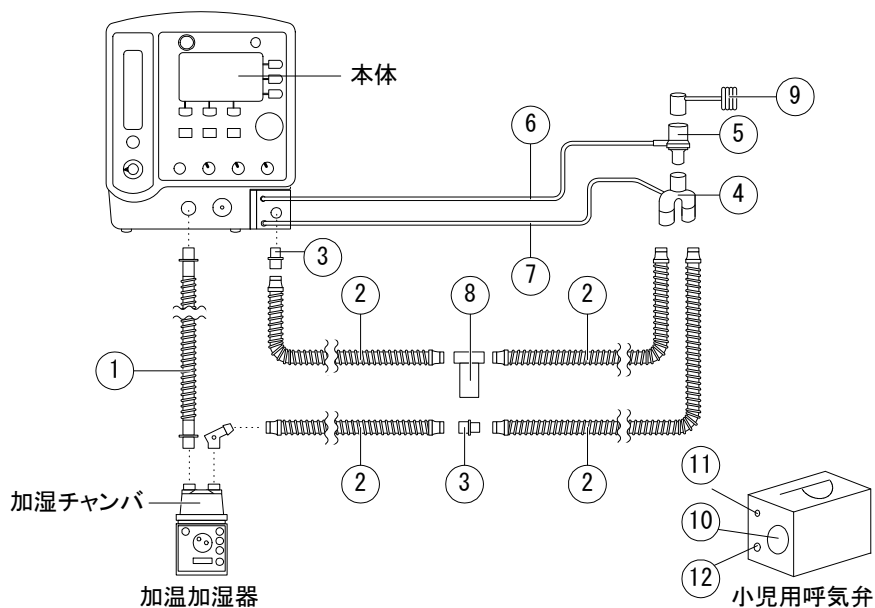

名称	説明
① φ10 回路ホース	内径 10 mm の呼吸回路ホース。
② φ22 回路ホース	内径 22 mm の呼吸回路ホース。
③ φ22 用回路コネクタ	φ22 回路ホース用のジョイントコネクタ。
④ φ22 用 Y ピース	φ22 回路ホース用の Y ピース。 吸気側と呼気側を接続します。
⑤ SmartSync	微小差圧(流量)を検知するセンサー。 SmartSync 前後の微小差圧を、気道内圧測定チューブと SmartSync 基準圧測定チューブで検知し、患児の呼吸努力をトリガーすることが可能となります。
⑥ 気道内圧測定チューブ	気道内圧を測定するためのチューブ。 SmartSync に接続します。
⑦ SmartSync 基準圧測定チューブ	微小差圧(流量)を測定するためのチューブ。 気道内圧測定チューブと併用します。
⑧ ウォータートラップ	呼吸回路の水除去トラップ。
⑨ テスト肺	テスト用の模擬肺。
⑩ 呼気側接続口	呼吸回路の呼気側を接続する接続口。
⑪ 気道内圧測定チューブ接続口	気道内圧測定チューブを接続する接続口。
⑫ SmartSync 基準圧測定チューブ接続口	SmartSync 基準圧測定チューブを接続する接続口。