


i. 新生児用呼吸回路の接続

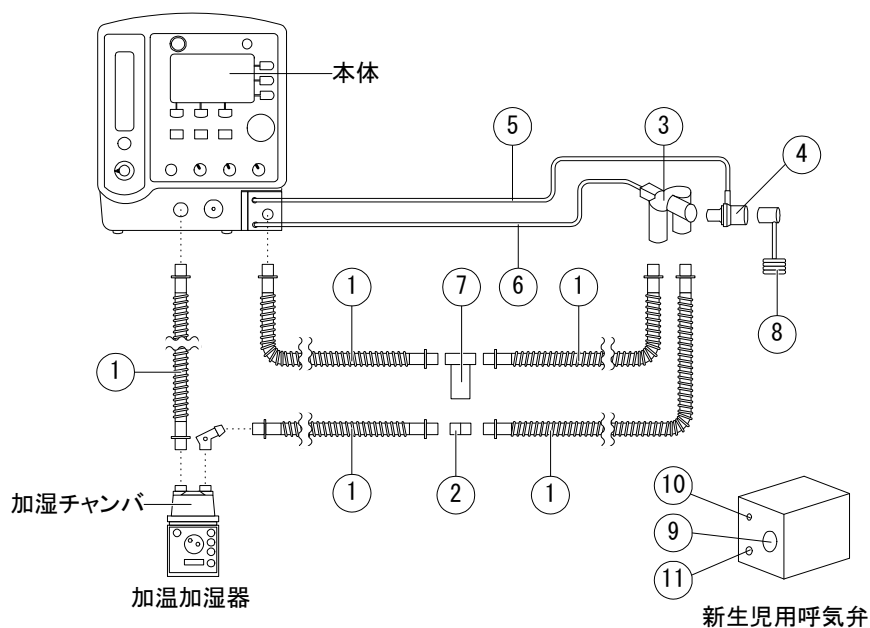

名称	説明
① φ10 回路ホース	内径 10 mm の呼吸回路ホース。
② φ10 用回路コネクタ	φ10 回路ホース用のジョイントコネクタ。
③ φ10 用 Y ピース	φ10 回路ホース用の Y ピース。 吸気側と呼気側を接続します。
④ SmartSync	微小差圧(流量)を検知するセンサー。 SmartSync 前後の微小差圧を、気道内圧測定チューブと SmartSync 基準圧測定チューブで検知し、患児の呼吸努力をトリガーすることが可能となります。
⑤ 気道内圧測定チューブ	気道内圧を測定するためのチューブ。 SmartSync に接続します。
⑥ SmartSync 基準圧測定チューブ	微小差圧(流量)を測定するためのチューブ。 気道内圧測定チューブと併用します。
⑦ ウォータートラップ	呼吸回路の水除去トラップ。
⑧ テスト肺	テスト用の模擬肺。
⑨ 呼気側接続口	呼吸回路の呼気側を接続する接続口。
⑩ 気道内圧測定チューブ接続口	気道内圧測定チューブを接続する接続口。
⑪ SmartSync 基準圧測定チューブ接続口	SmartSync 基準圧測定チューブを接続する接続口。