

開始

下記の通りに初期設定をする：
EPAP: 4 cmH₂O
O₂: 現在の設定または処方通り
Max P: 25 cmH₂O
Max V: 1000 ~ 1500 mL
PPV %: 80 ~ 100%
Max E: 5 cmH₂O/L
Max R: 2 cmH₂O/L/s
HIP: > Max P
その他の設定：通常のプロトコル通り

Max E
タイトレーション

患者がフロー、
圧力、換気量が多
いと言う

いいえ

患者が吸気を
自発的に止めるた
めに補助筋を使っ
ている

いいえ

Max VかMax Pの
上限に達した

いいえ

マスクのリークが
急増した

いいえ

Max Eを2 cmH₂O/L 増加

患者が楽になるよ
うに、Max Eを2
cmH₂O/L 低減

Max R
タイトレーション

患者がフロー、
圧力、換気量が多
いと言う

いいえ

患者が吸気を
自発的に止めるた
めに補助筋を使っ
ている

いいえ

Max VかMax Pの
上限に達した

いいえ

マスクのリークが
急増した

いいえ

Max Rを1 cmH₂O/L/s 増加

患者が楽になるよ
うに、Max Rを
1 cmH₂O/L/s 低減

必要であれば、Max E
タイトレーションを
繰り返す

許容されるようであ
れば、PPV %を
減らしてタイトレ
ーションする

終了